

Produktbeskrivning

För att lyfta kraftigt överviktiga personer krävs speciellt utvecklade lyfthjälpmiddel och metoder. Liko har utvecklat produktserien Ultra för att kunna lyfta dessa tunga brukare på ett säkert och bekvämt sätt.

UltraSling ger stöd för hela ryggen upp till axlarna. Med sin unika design hängs benstöden upp var och en för sig på lyftbygeln vilket ger fritt utrymme för magen samt optimalt stöd för benen. UltraSling finns i tre storlekar där skillnaden är benstödens längd. Vilken storlek man väljer beror på brukarens behov av stöd för benen och möjlighet till flexion i höft- och knäleder.


Vi rekommenderar att man är minst två medhjälpare vid förflyttningen.

UltraSling används tillsammans med Likos lyftsystem UltraTwin. Systemet tar då en maxlast på upp till 500 kg beroende på vilka enskilda produkter som ingår i den sammansatta lyftenheten. UltraTwin systemet finns både för fast installation och för fristående montering typ Liko FreeSpan.

△ är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttas.

I texten kallas den som blir lyft för brukaren och den som hjälper för medhjälparen.

📖 Läs bruksanvisning för både lyftsele och den lyft som används. Bruksanvisningar kan laddas ner kostnadsfritt från www.liko.se.

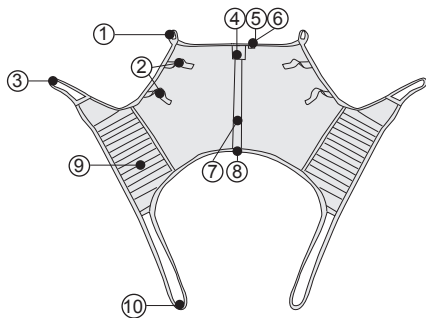

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Övre bandögla | 6. Storleksmarkering |
| 2. Styrhandtag | 7. Mittbakband |
| 3. Yttre benstödsögla | 8. Nederkant |
| 4. Märklapp | 9. Benstöd |
| 5. Serienummer | 10. Inre benstödsögla |

Applicering av UltraSling i sittande


1. Placera lyftselen bakom brukarens rygg med märkningen uppåt och utåt. Med hjälp av handflatan förs lyftselsens nederkant ner till brukarens svanskota.*
2. Drag fram lyftselsens benstöd utmed vardera lårs utsida tills tyget är helt sträckt i lyftselsens nederkant.
3. Skjut in benstödet under brukarens ben med benstödsögla placerad under tyget.* Då benstödsstyget når insidan av låret dras benstödsögla fram. Dra i både inre och yttre benstödsöglorna till dessa erhåller samma längd.
4. Koppla bandöglorna på lyftbygel. De övre bandöglorna kopplas på den breda bygel och benstödsöglorna på den smalare bygel.

5. Lyft brukaren.

* Uppstår problem vid denna applicering kan det bli nödvändigt att använda Lyftband XL för att få lyftselen på plats. Kontakta Liko för mer information.

För applicering av UltraSling i liggande rekommenderas användning av Liko RepoLakan™ Original, se vidare information i dess bruksanvisning eller på www.liko.se.

Översikt Liko® UltraSling, mod. 06

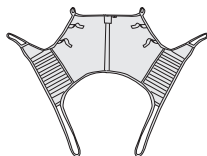

| Artikel | Art nr | Storlek | Material | Maxlast |
|-----------------|---------|---------|--------------|---------|
| Liko UltraSling | 3506114 | Short | Polyester | 500 kg |
| Liko UltraSling | 3506115 | Regular | Polyester | 500 kg |
| Liko UltraSling | 3506315 | Regular | Nätpolyester | 500 kg |
| Liko UltraSling | 3506116 | Long | Polyester | 500 kg |

Tvättråd: Se lyftselsens produktetikett samt bifogad bilaga "Skötselråd för Likos lyftselar".

Förväntad livslängd

Produkten har en förväntad livslängd på 1-3 år, vid normal användning. Livslängden varierar beroende på bl.a. material, användningsfrekvens, tvättförfarande och belastning.

Periodisk inspektion

En periodisk inspektion av produkten skall utföras minst var 6:e månad. Tätare inspektioner kan krävas om produkten används eller tvättas oftare än normalt. Du finner Likos protokoll för Periodisk inspektion för respektive produkt på www.liko.se.

Maxlaster

Olika tillåtna maxlaster kan förekomma för olika produkter i den sammansatta lyftenheten: skensystem, lyft, lyftbygel, lyftsela och eventuella andra tillbehör som används. För den sammansatta lyftenheten gäller alltid den lägsta maxlasten av de som anges på respektive produkt. För att Liko UltraSling kunna lyfta 500 kg erfordras att även lyft och lyftbygel är godkända för denna maxlast.

CE Medicinteknisk klass I produkt

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta din Likorepresentant för information, råd och eventuella uppdateringar.

⚠ Viktigt!

Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk, studera därför noga bruksanvisning från såväl lyft som lyfttillbehör. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen, endast den personal som är informerad bör använda utrustningen.

Förvissa dig om att lyfttillbehöret passar till den lyft som används. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet.

Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara lyftsituationen.

Kontrollera lyftselen regelbundet, särskilt efter tvätt. Var särskilt uppmärksam på förslitning och skador på sömmar, tyg, band och bandöglor. Använd ej skadade lyfttillbehör. Om något är oklart kontakta tillverkaren eller leverantören.



www.hill-rom.com | www.liko.com