
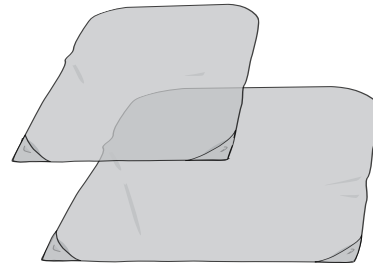
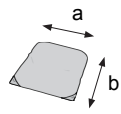


Handy Glidlakan Lång

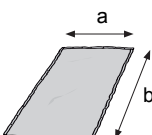

Handy Glidlakan Kort

Produktöversikt

Artikel	Enhet	Modell	Art. nr.	Storlek	Mått (a x b)	
Handy Glidlakan Kort, u. handtag	par	150	3715015	M	70 cm x 70 cm	
Handy Glidlakan Kort, u. handtag	par	150	3715017	XL	120 cm x 85 cm	
Handy Glidlakan Lång, m. handtag, inkl. Spännband*	par	160	3716015	M	90 cm x 185 cm	
Handy Glidlakan Lång, m. handtag, inkl. Spännband*	par	160	3716017	XL	140 cm x 215 cm	

* Spännband 260 cm, art. nr. 3696002.

Produktbeskrivning

Handy Glidlakan är utvecklad av Liko speciellt för att underlätta förflyttningar av en brukare genom att minska friktionen. Glidlakanet är tillverkat i ett lågfriktionsmaterial som minimerar friktion mellan brukare och underlag och på så sätt minskar arbetsbelastningen för vårdpersonal i många olika situationer.

Glidlakan Lång är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta applicering av lyftselar på brukare med mycket smärta, med kontrakturer eller som är väldigt tunga.

Glidlakan Kort används för att underlätta applicering av lyftselar i stol/rullstol. Båda modellerna kan användas

även för andra förflyttningssituationer, exempelvis för vändning och förflyttning högre upp i säng.

Tänk på att de förflyttningssituationer som beskrivs i denna bruksanvisning ska gå lätt och smidigt. Om de upplevs som tunga rekommenderar vi att man byter till något annat av Likos många hjälpmedel för lyft och förflyttning.

⚠ Handy Glidlakan är inte avsedd för lyft och förflyttning från liggande till sittande. Vid sådana behov rekommenderar vi lyft med någon av våra lyftselar som finns i många modeller.

I texten kallas den som blir förflyttad för brukaren och den som hjälper för medhjälparen.

⚠ är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttas.

📖 Läs bruksanvisningen. Bruksanvisningar kan laddas ner kostnadsfritt från www.liko.se.

Säkerhetsföreskrifter

△ Att tänka på:

- Glidlakanet ska under inga omständigheter användas till att lyfta en person.
- Om det behövs en eller flera medhjälpare får bedömas från fall till fall.
- Planera förflyttningsmomentet så att det sker så tryggt och smidigt som möjligt.
- Se till att hjulen på rullstol, säng, brits etc. är låsta under arbetsmomenten. Använd sänggrind vid behov.
- Materialet i Glidlakanet har låg friktion och kan orsaka olyckor om den lämnas kvar under brukaren, på golvet eller i rullstolen. Iakttag försiktighet vid användning och avlägsna alltid Glidlakanet direkt efter användning. Lägg bort/häng upp det när det inte används.
- Tänk på ergonomi! Arbeta lugnt och metodiskt, i gångstående och med rak rygg. Använd sängens höj- och sänkfunktioner. Minska hävvarma - arbeta nära.

△ VIKTIGT!

Förflyttning av en person medför alltid en viss risk. Studera därför noga bruksanvisningen för förflyttningshjälpmedlet. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Endast den personal som är informerad bör använda produkten. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara förflyttningssituationen. Om något är oklart kontakta tillverkaren eller leverantören.

Tillsyn och skötsel

Kontrollera Glidlakanet regelbundet, särskilt efter tvätt. Var särskilt uppmärksam på förslitning och skador på sömmar, tyg, band, handtag och friktionen i materialet. Använd ej skadade produkter.

För tvättråd se Glidlakanets märklapp.

Om något är oklart kontakta tillverkaren eller leverantören.

CE Medicinteknisk klass I produkt

Handy Glidlakan uppfyller alla krav enligt MDD klass I produkter, den uppfyller även alla krav enligt harmoniserad standard EN ISO 10535.


Mönsterskyddad design

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta din Likorepresentant för information, råd och eventuella uppdateringar.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485. Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Placering av Glidlakan Lång

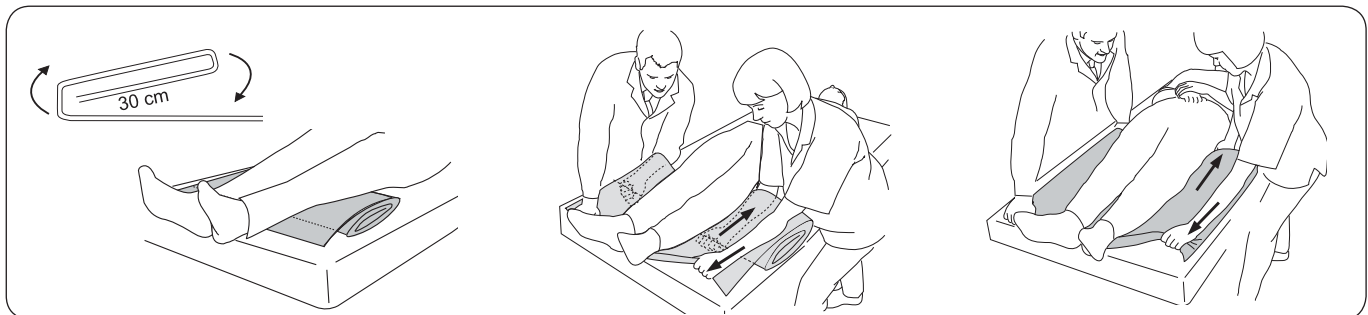

Vik Glidlakanet, eventuellt två Glidlakan tillsammans, beroende på avsedd användning, i ca. 30 cm långa veck tills hela längden är uppvikt.

Placera det vikta Glidlakanet under brukarens underben med inviken vända ned mot madrassen.


Medhjälparna tar tag i den undre delen av Glidlakanet, med armarna så nära brukaren som möjligt. Håll emot med andra handen genom att ta tag om Glidlakanet på ovasidan. Medhjälparna drar samtidigt ut första vecket upp under brukaren.

TIPS! Detta underlättas om handen hålls ned mot madrassen under dragrörelsen.

Arbeta med raka armar och tyngdöverföring.

Upprepa tills Glidlakanet ligger under hela brukaren.

Placering av lyftsele i säng med Glidlakan Lång

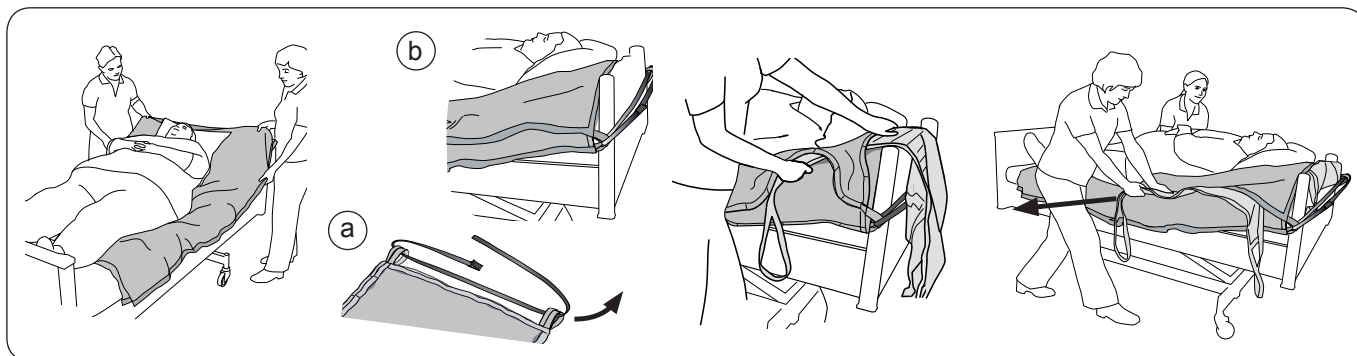


Placera Glidlakanen under brukaren enligt tidigare beskrivning.

Trä det medföljande Spännbandet genom Glidlakanens öglor (se bild a).

Fäst Spännbandet runt sängens huvudgavel (se bild b).

Placera lyftselen mellan Glidlakanen. Börja vid huvudändan. Se till att lyftselen ligger centrerad under brukaren.

Dra lyftselen nedåt under brukaren genom att dra bendelen ner mot fotänden med ena handen och samtidigt trycka ned bendelen mot madrassen med andra handen. Tänk på att arbeta ergonomiskt.

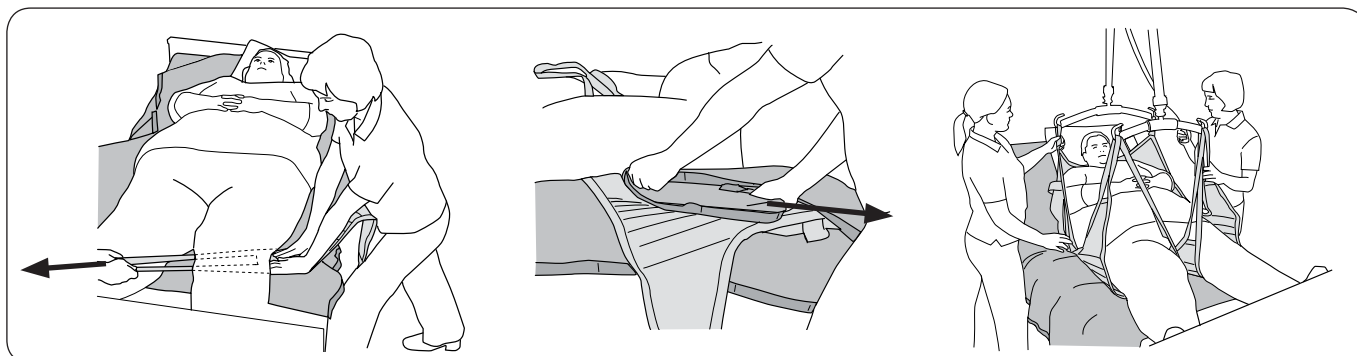


Placera bendelen genom att trycka ned den mot madrassen samtidigt som den andra medhjälparen drar i bandöglan.

Ta försiktigt bort det översta Glidlakanet genom att dra det under sig själv.

Kroka på lyftsels bandöglor på lyftbygeln enligt lyftsels bruksanvisning.

Lyftet kan nu påbörjas.

Borttagning av lyftsele i säng med Glidlakan Lång

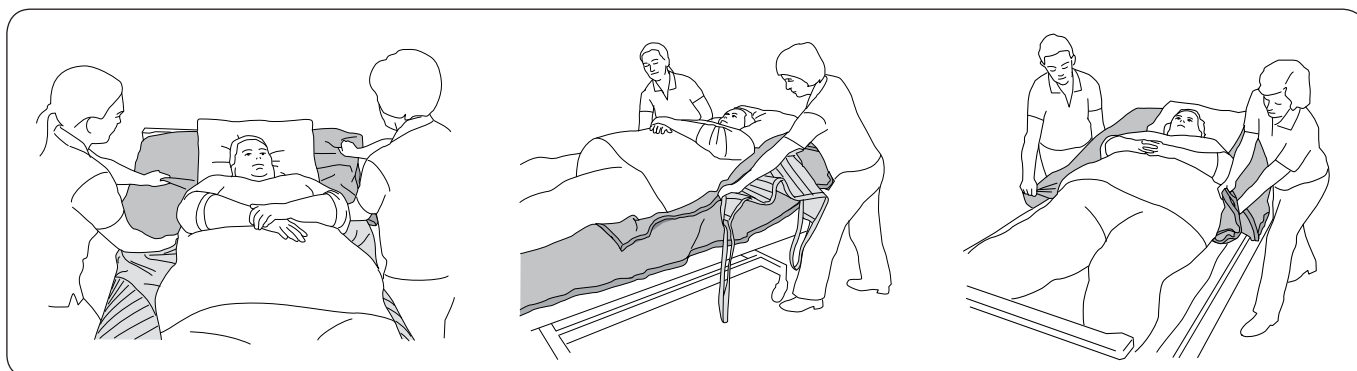


Lägg ut ett Glidlakan på sängen innan brukaren sänks ner med lyften. När brukaren ligger ner placeras det andra Glidlakanet enligt tidigare beskrivning, men börja från huvudändan. Se till att Glidlakanet placeras över lyftselen och ända ned till stussen.

Ta bort lyftselen genom att fatta tag i bendel och överkant av lyftselen och dra upp mellan Glidlakanen.

Ta försiktigt bort de båda Glidlakanen genom att dra dem under sig själva och upp mot huvudändan.

Placering av lyftsele i stol/rullstol med Glidlakan Kort

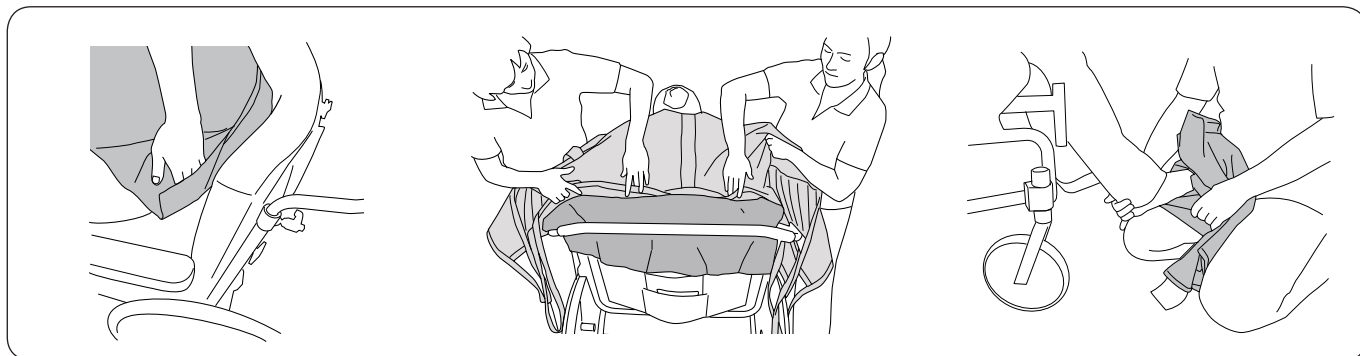


För ned de båda Glidlakanen mellan brukaren och stolsryggen. Använd dig av fickorna för att underlätta placeringen. Se till att Glidlakanen når ned till brukarens stuss.

Placera sedan lyftselen mellan Glidlakanen och för ner den bakom brukarens rygg. Tänk på att arbeta ergonomiskt.

För att underlätta placeringen av lyftselens benstöd kan Glidlakanet användas för att glida upp brukarens fot på ditt eget ben. För ytterligare information om hur lyftselen ska placeras se bruksanvisningen för respektive lyftsele.

Förflyttning högre upp i säng med Glidlakan Kort

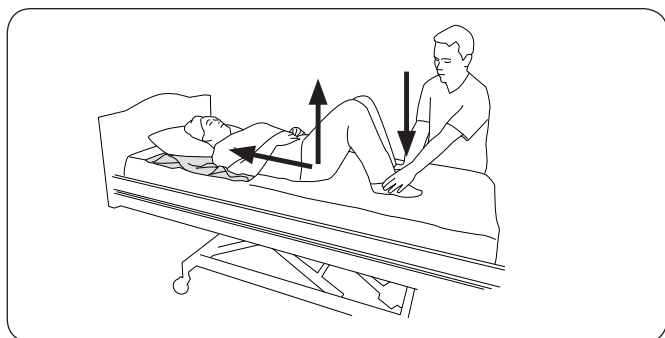


Med en medhjälpare

Placera Glidlakanet under brukarens huvud och skuldror. Brukaren böjer benen och medhjälparen trycker ned brukarens fötter för ökad friktion. Brukaren själv lättar på vikten under stussen och "trycker" sig samtidigt uppåt i sängen.

För denna metod krävs att brukaren har viss styrka/funktion i ben och bål.

Höj sängens fotända för att underlätta förflyttningen!

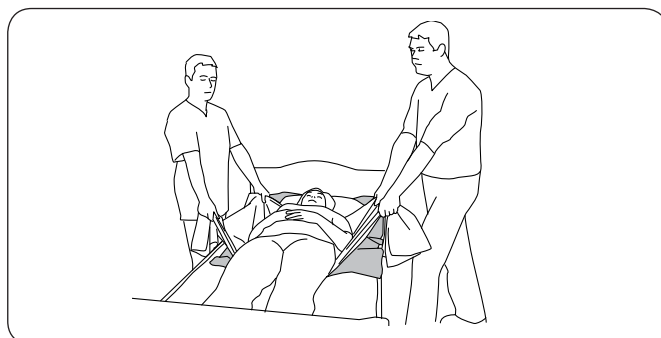

Med två medhjälpare

Placera Glidlakanet från brukarens huvud ned till stussen, under ett draglakan. Medhjälparna ställer sig i linje med brukarens axlar i gångstående ställning och tar tag i var sin ände av draglakanet. Medhjälparna flyttar brukaren högre upp i sängen genom att göra en tyngdöverföring till bakre benet. Proceduren upprepas tills brukaren ligger i önskad position.

Tänk på ergonomi - undvik att dra med armarna!

Höj sängens fotända för att underlätta förflyttningen!



A Hill-Rom Company

www.liko.se

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Tel: 0920 - 47 47 00
Fax: 0920 - 47 47 01
info@liko.se

