

## HANDY LÅGFRIKTIONSPRODUKTER



Finns alltid tillhands för  
smidiga förflyttningar



*Enkla hjälpmedel som alltid finns på plats. Så skulle man kunna sammanfatta Likos nya produktserie Handy. I serien finns flera manuella hjälpmedel som kompletterar vårt breda utbud av personlyftar och tillbehör.*

*Handyprodukterna uppfyller även ett annat behov. Behovet av att själva kunna hjälpa till efter egen förmåga. Inte minst för personer med funktionshinder är det ofta mycket viktigt att inte bli för passiv och låta vårdpersonalen göra hela jobbet vid förflyttningar i eller utanför sängen.*

*Flera av Handyprodukterna låter brukaren i hög grad delta i förflyttningen och stödjer därmed vår filosofi att inte använda hjälpmedel som i onödan gör brukaren för passiv.*

*Först ut i serien är produkterna som presenteras i denna broschyr; Handy Glidlakan och Handy Glidcylinder.*





## Handy Glidlakan

Handy Glidlakan är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta applicering av lyftselar, särskilt på mycket tunga brukare, smärtkänsliga eller brukare med kontrakturer.

Handy Glidlakan finns i två olika storlekar där den mindre modellen Kort främst används för att förenkla placering av lyftselen i en rullstol eller under brukarens ben. Denna modell har små fickor som underlättar vid applicering i t.ex. en trång rullstol.

Den större modellen Lång används också för att applicera en lyftsele, under en liggande brukare. Handy Glidlakan Lång har öglor i överkanten för att lätt kunna fästa glidlakanet i sängen, och därmed klara uppgiften med bara två medhjälpare.

Glidlakanen levereras alltid i set om två, och används normalt också parvis.

Tänk på att förflyttning med Glidlakan ska gå lätt och smidigt. Om arbetsmomenten upplevs som tunga rekommenderar vi att använda andra lyft- och förflyttningshjälpmedel ur vårt breda sortiment.





## Placering lyftsele i liggande



1. Med en liggande brukare används två Glidlakan Lång.

2. Glidlakanen kan med fördel fästas i sängens huvudände, med hjälp av de smarta öglorna och ett spännband (tillbehör).

3. De två glidlakanen samverkar med varandra och gör det lätt att föra in eller ta bort lyftselen under brukaren.



## Placering lyftsele i sittande



I sittande position kan Handy Glidlakan Kort göra det lättare att föra in lyftselen bakom brukarens rygg...



...eller få lyftselsens benstöd på plats under brukarens lår.

### ARTIKELBENÄMNING

	ART. NR.	STORLEK	MÅTT (CM)
Handy Glidlakan Kort, utan handtag	3715015	M	70 x 70
Handy Glidlakan Kort, utan handtag	3715017	XL	120 x 85
Handy Glidlakan Lång, med handtag	3716015	M	90 x 185
Handy Glidlakan Lång, med handtag	3716017	XL	140 x 215



## Handy Glidcylinder

Handy Glidcylinder finns i tre olika modeller med olika användningsområden, och förpackas (till skillnad från Handy Glidlakan) styckevis.

Den minsta modellen, Kort, används främst för att flytta en brukare högre upp i sängen.

Mellanvarianten Lång används för att vända en brukare i sängen, eller vid förflyttning mellan två sängar.

Handy Glidcylinder Bred kan användas för att vända eller flytta brukaren i sängen.

Den kan också användas för överflyttning mellan två sängar.

Tänk på att förflyttning med Glidcylinder ska gå lätt och smidigt. Om arbetsmomenten upplevs som tunga rekommenderar vi att använda andra lyft- och förflyttningshjälpmedel ur vårt breda sortiment.

### ARTIKELBENÄMNING

	ART. NR.	STORLEK	MÅTT (CM)
Handy Glidcylinder, Kort	3710015	M	70 x 90
Handy Glidcylinder, Lång	3711015	M	90 x 185
Handy Glidcylinder, Bred (med handtag)	3712015	M	140 x 140



### Vändning i säng



Med Handy Glidcylinder kan brukaren lättare vändas i sängen.



Brukaren vänds försiktigt och kontrollerat med hjälp av den låga friktionen i glidcylindern.

### Högre upp i säng



Med egen kraft kan brukaren hjälpa till att flytta sig högre upp i sängen. Medhjälparen underlättar genom att hålla brukarens fötter.



Glidcylindern gör att betydligt mindre kraft behövs för repositioneringen, samtidigt som brukaren får medverka aktivt.

### Mellan två sängar



Glidcylinder Bred kan användas för att snabbt och smidigt flytta en brukare mellan två sängar.



Inte minst på sjukhus är behovet stort att flytta patienter till och från transportvagnar.





### Liko har hela lösningen för säkra lyft och förflyttningar

Nu har du läst om produkter som är en viktig del i att lösa lyft- och förflyttningssituationer i din verksamhet. Men det räcker faktiskt inte med det. Vi har genom åren funnit att en fungerande och säker lösning står på tre ben.

Du behöver för det första säkra och lättanvända **PRODUKTER**. För det andra krävs **KUNSKAP** om hur du på ett säkert sätt hanterar dina hjälpmedel och genomför säkra lyft och förflyttningar. Och för det tredje behöver du **ARBETSMETODER** som säkerställer att personalen verkligen arbetar på rätt sätt, ett program för säkra förflyttningar.

Genom vår kunskap ger vi dig kompetens för alla tre delar. Med hjälp av Liko ser du till att både personal och brukare får en säker miljö för lyft och förflyttningar.

[www.liko.se](http://www.liko.se)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå  
Tel 0920-47 47 00  
Fax 0920-47 47 01  
info@liko.se

 **Liko**  
A  Company