


Likorall


242/243/250

Användaranvisning


Svensk

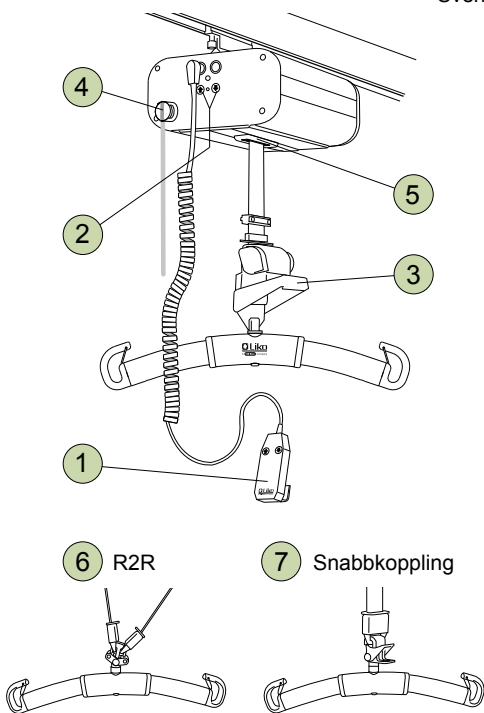


1 Handkontroll

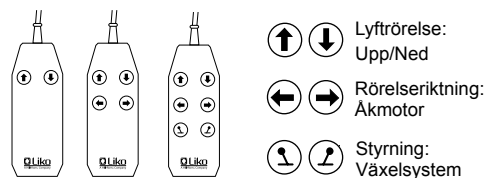

IR-handkontroll:

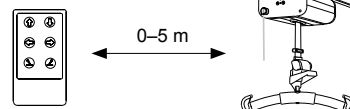


2 Nödsänkning/höjning (elektrisk)

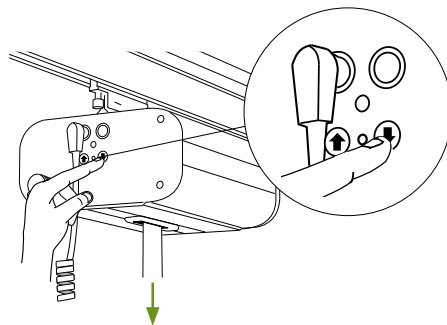

3 Mekanisk nödsänkning

Endast 242 S, ES

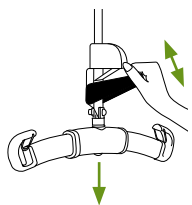

Aktivera:

Tryck ned nödsänkingshandtaget upprepade gånger.




Återställ:


Avlasta lyftbandet. Håll ned nödsänkingshandtaget till hälften samtidigt som den svarta ratten vrids medurs.

4 Nödstopp


Aktivera:

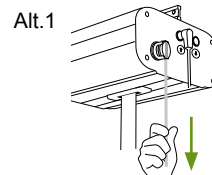


Alt. 2

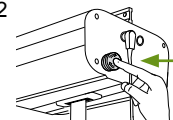

Återställ:

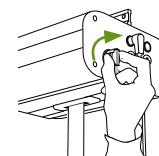

5 Ändlägesbrytare

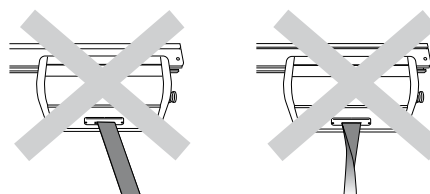


Lyftförelsen avbryts vid snedbelastning av lyftbandet eller om lyftbandet är vridet.

6 7 Alternativ bygelkoppling

6. R2R lyftbygel har fäste för två lyftband för förflyttning mellan två lyftmotorer.

7. Lyftbygel med Snabbkoppling gör det lätt att byta lyftbygel.

Laddning av batterier

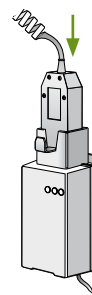

- Ladda lyften regelbundet efter användning.
- Lyften fungerar inte under laddning.
- Nödstoppen ska ej vara intryckt under laddning.

Säkerhetsföreskrifter

- Läs bruksanvisning för både patientlyft och lyfttillbehör före användning.
- Innan brukaren lyfts från underlaget, men när lyftselens band är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är rätt påhakade på lyftbygeln.
- Maxlast Likorall 242: 200 kg.
Maxlast Likorall 243: 230 kg.
Maxlast Likorall 250: 250 kg.

För bibehållen maxlast krävs tillbehör avsedda för samma belastning eller mer.

VIKTIGT!

Denna användaranvisning ersätter inte lyftens bruksanvisning, vilken kan laddas ner från www.liko.se.

Ergonomi

- Undvik manuella lyft – låt lyften göra jobbet.
- Stressa inte – arbeta lugnt och metodiskt.
- Skona ryggen – arbeta i gångstående med rak rygg.
- Använd sängens höj- och sänkfunktioner.
- Minska hävarmarna – arbeta nära.

Rengöring

Vid behov, rengör lyften genom att torka av den med en trasa fuktad med varmt vatten eller tvättspit.

Enkel felsökning

Kontrollera att:

- nödstoppen inte är intryckt
- batteriet är laddat
- handkontrollen är rätt ansluten
- mekaniska nödsänkningen är återställd.

Övriga användaranvisningar

Användaranvisningar för Likos lyftar och lyftselar finns att ladda ner från www.liko.se.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.se

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Tel: 0920 - 47 47 00
Fax: 0920 - 47 47 01
info@liko.se