

Liko's lyftselar är avsedda att vara individbundna. För att undvika eventuell smittspridning är det viktigt att rengöra lyftselen då den blivit nedsmutsad eller om lyftselen ska användas till en annan brukare.

Liko's lyftselar är tillverkade i ett antal olika material med olika egenskaper. Lyftsелarna tvättas i tvättmaskin. Tvätt och torktemperatur visas på produktetiketten. Torkning bör ske så snabbt som möjligt efter tvätt, helst med torktumling eller torkskåp. Då det gäller torkning finns det ett fåtal produkter som inte kan torktumlas samt några som kan torkas i hög temperatur.

Flera av Liko's lyftselar innehåller förstärkningsmaterial exempelvis i benstöd och rygg-/huvudstöd. Detta material tål tvätt i 60-80°C. Vid högre temperatur finns risk att förstärkningsmaterialet deformeras, blir kompakt och på så sätt försämrar komforten. Lyftsелens säkerhet påverkas i allmänhet inte.

Det är viktigt att följa rekommenderade skötselråd annars gäller inte garantin samt att lyftsелens livslängd kan reduceras.

Tvättinstruktioner

Följ tvättråden på lyftsелens produktetikett.



Tag ur plastlattor (i förekommande fall).



Vid behov, förtvätt i låg temperatur 25-30°C.
Vissa fläckar försvinner lättare i lägre temperaturer.



Maskintvätt i det angivna gradtalet. Använd tvättmedel.



Torktumla i låg temperatur max 50°C eller torka i torkskåp.



Ej klorblekning.



Ej kemtvätt.



Ej strykning.



Hängtorkas i skugga.

Avspritning

För plastlattor och produkter i plastbelagd väv rekommenderas avtorkning med 70% etanol eller 45% iso-propanol. Plastlattor kan även torkas av med vattenlöslig tvål. Var dock uppmärksam på att vissa detaljer, exempelvis band och sömmar, är av annat material och behöver maskintvättas för att bli helt rena.

Desinfektion


För termisk desinfektion, tvätta i 65°C i minst 10 minuter eller i 71°C i minst 3 minuter. Vid båda alternativen rekommenderar vi att man lägger till 8 minuter för att säkerställa att värmen penetrerar materialet och att desinficering säkerställs. Det är viktigt att tvättprogrammet avslutas med en sköljgång.

(Ref. HSG (95)18: Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS).

Kontrollera lyftselen efter tvätt

Samtliga punkter kontrolleras med avseende på förslitningsskador och nötning:

- Tyg
- Band
- Sömmar
- Upphängningsöglor
- Spännen (i förekommande fall)

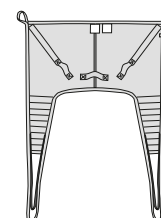

Lyftsелen har en begränsad livslängd och är en viktig del för säkerheten. Använd inte skadade lyftselar.

Protokoll för periodisk inspektion kan användas som vägledning för vilka detaljer som är extra viktiga att kontrollera för respektive lyftsелmodell. Lyftselar i polyestertyg har längre livslängd än lyftselar i nätpolyester. Handtagen som sitter på vissa lyftselar är avsedda att styra med. För hård belastning på handtagen kan medföra att lyftsелen brister.

Solo produkter

Liko's Solo produkter är förbrukningsartiklar som skall vara individbundna. Solo produkter skall ej tvättas utan istället kasseras när de blir smutsiga eller när brukaren inte längre behöver dem.



Ej tvättas.



Ej användas.

Om en Solo produkt tvättats framträder denna symbol som visar att produkten ej får användas och skall istället kasseras.

Översikt tvättinstruktioner per material

| | | Polyester | Nätpolyester | Nallemonstrad polyestertrikå | Plastat polyester nät | Plastad väv | Polyester/bomull Repolakan | Bomull/polyester Lyftduk 1900 | Solo material | Polyamid Handy Glidlakan, Handy Glidcylinder | Förlängningsöglor, Upphängningsband |
|---|--|----------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| Tvätt 60-80°C | | X | X | X | X | X | | | | X | |
| Tvätt 60-85°C | | X ¹ | | | | | | X | | | X |
| Tvätt 85°C | | | | | | | X | | | | |
| Ej vattentvätt | | | | | | | | | X | | |
| Ej klorblekning | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Torktumling, låg temperatur max 50°C | | X | X | X | | | | X | | X | |
| Torktumling, normal temperatur max 70°C | | | | | | | X | | | | X |
| Ej torktumling | | | | | X | X | | | X | | |
| Hängtorkas i skugga | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| Strykning, max 150°C | | | | | | | X ² | X ² | | | |
| Ej strykning | | X | X | X | X | X | | | X | X | X |
| Ej sköljmedel | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ej kemtvätt | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kan avspritas | | | | | X | X | | | | | |
| Termisk desinfektion | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |

¹ Artikelnr. 3526111, 3526115, 3526116, 3526117

² Strykes på lakanets insida (sidan utan band)